

Helicobacter pylori Testlerinde Yeni Nesil: PyloPlus 13-C UBT



Helicobacter pylori Testlerinde Yeni Nesil: PyloPlus 13-C UBT

C-13 ÜRE NEFES TESTİ




ÜRE NEFES TESTİNİN AVANTAJLARI

- Non-invaziv yöntem: Hasta konforunu artırır.
- Yüksek hassasiyet ve özgüllük: Güvenilir sonuçlar sağlar.
- Basit ve hızlı kullanım: Tek tuşla çalıştırılabilir.
- Kit karşılığı kullanım sözleşmeleri mevcuttur.
- CLIA muaf: Özel bir sertifika gerektirmez.
- Tek bir ziyarette tanı ve tedavi imkanı sunar.
- PPI kullanımını durdurmaya gerek kalmayabilir.
- Hızlı sonuç: Yaklaşık 5 dakikada sonuç verir.
- Müşteri desteği ve garanti: Üstün hizmet ve güvence sunar.
- Zaman tasarrufu: Tüm test süreci yaklaşık 15 dakika sürer.

Helicobacter pylori Testlerinde Yeni Nesil: PyloPlus 13-C UBT

Klinik Denemelerde %100 Duyarlılık ve Özgüllük:
Proton Pompa İnhibitörü (PPI) kullanan hastalarda
bile olağanüstü tanı performansı (%98,4 duyarlılık
ve %99,2 özgüllük) gösterir.

- Geniş Hasta Kapsamı: Yetişkin ve pediatrik hastalarda (3-17 yaş) kullanım için onaylıdır.
- Hamilelerde kullanımı uygundur.

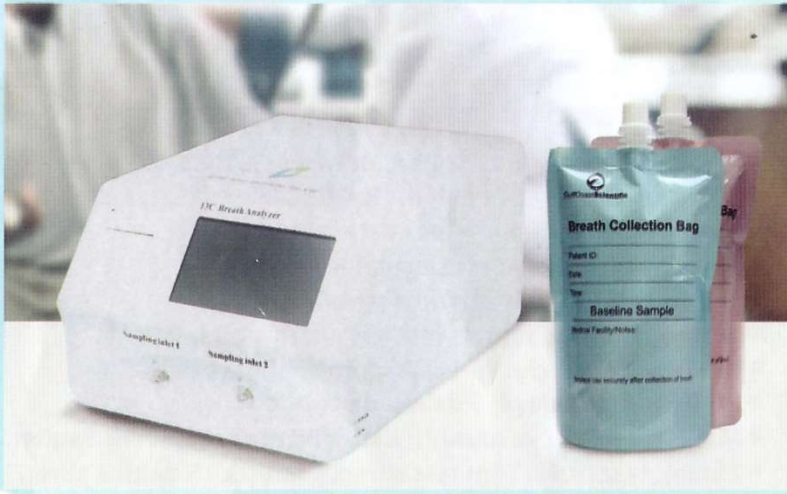

Helicobacter pylori Testlerinde Yeni Nesil: PyloPlus 13-C UBT

PyloPlus UBT Nedir?


PyloPlus UBT, mevcut Helicobacter pylori enfeksiyonlarını tespit etmek için geliştirilmiş, yalnızca hastanın nefesini kullanarak non-invaziv bir yöntem sunan yeni bir 13C üre nefes testidir.

Bu test, yoğun klinik ortamların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

PyloPlus UBT Nasıl Uygulanır?



1. Bazal örnek alınması: Hastadan derin bir nefes alması, nefesini 10 saniye tutması ve ardından hafifçe nefes verdikten sonra nefesini torbayı tamamen dolduracak şekilde bazal toplama torbasına üflemesi istenir. Daha sonra torbanın kapağını sıkıca kapatarak örneğin kaybını önleyin.

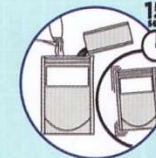

2. Çözelti hazırlığı: Limon aromalı paketin içeriğini üre test torbasına boşaltın ve yaklaşık 1/3 oranında su ekleyin. Çözeltiyi tamamen karışması için 15 saniye çalkalayın.



3. Çözelti içilmesi: Hastaya, verilen pipet yardımıyla hazırlanan çözeltinin tamamını içirin.



4. İkinci nefes örneği: 15 dakika bekleddikten sonra hastadan ikinci nefes örneğini, ikinci toplama torbasına üflemesini isteyin. Örneğin kaybını önlemek için torbanın kapağını sıkıca kapatın.